

Lähetysaikataulu

- Lähetä näyte niin pian kuin mahdollista. Älä lähetä näytettä torstaina tai perjantaina, koska olemme viikonlopun suljettuna.

Kun olet valmis lähettämään näytteen

- Varmista, että seuraavat tiedot on annettu
 - Henkilötietolomake täytettynä ja tarkistettuna
 - Pro-forma-lasku (vain, jos lähetät EU:n ulkopuolelta)
- Valmistele lähetys:
 - Lääkäri / hoitaja laittaa täytetyn henkilötietolomakeen ja lämpöeristetyn laatikon, jossa näyte ja jääpakkkaus, lähetyslaatikkoon.
 - Laita laatikko DHL- lähetyspussiin ja lähetä (ks. Lähetysohjeet)

Testipakettisi, ole hyvä!

Thyroid Plus testi - Nordic Laboratories - antaa tärkeää tietoa terveyteesi liittyen.

Henkilökohtainen hoitostrategia on lääketieteen tulevaisuutta. Se perustuu yksilölliseen biokemiaan ja geeniperimään liittyviin tietoihin. Tämä testi auttaa sinua hankkimaan objektiivista tietoa itsestäsi sekä luomaan tarkemman hoitostrategian ja toteuttamaan muutoksia, jotka johtavat parempaan terveydentilaan.

Tämä testipakkaus sisältää kaiken, mitä tarvitset näytteenottoon. Lue ohjeet huolellisesti ja seuraa niitä vaihe vaiheelta. Testituloksesi on lääkärin / terapeutin nähtävänä noin kolme viikkoa sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet näytteen.

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea testin tekemiseen, voit ottaa yhteyttä 045 1494 777 tai sh@nordic-labs.com

Tarkista testipaketin sisältö

Tärkeä:

Huomaa, että tätä testiä varten tarvitaan lääkärin tai hoitajan ottama verinäyte. Lue valmistelu- ja lähetysohjeet huolellisesti ennen kuin varaat ajan laboratorion.

Lähetysmateriaalit

- 1 x Laatikko, joka sisältää näytteenottotarvikkeet (**säilytä tämä laatikko näytteiden palauttamista varten**)
- 1 x lämpöeristetty laatikko (säilytä näytteiden palauttamista varten)
- 1 x jääpakkkaus
- 1 x lähetysohje
- 1 x henkilötietolomake
- 1 x DHL- palautuspussi
- 1 x DHL- palautusrahtikirja
- 2 x Pro-forma-lasku (**vain kun palautus EU:n ulkopuolisesta maasta**)

Näytteenottomateriaalit

- 1 x Seeruminerotteluputki (SST-putki)
- 1 x valkokorkkinen läpinäkyvä kuljetusputki
- 1 x pipetti
- 1 x biovaarapussi, jossa imupaperi
- 1 x kuplamuovipussi
- 1 x kuminauha

Jos jotain puuttuu tai on vanhentunut, otathan yhteyttä +44 15 80 20 16 87 tai testkits@nordicgroup.eu

Huomioi: Mikäli keräysohjeita ei noudateta huolellisesti, voidaan näytteenotto joutua uusimaan tai tulokset viivästyä ja aiheutua lisäkuluja.

Valmistelu

Näytteenoton ajoitus:

- Varaa verinäytteenotto laboratorioon maanantai- keskiviikko ennen klo 14 ja lähetä näyte samana päivänä kuin näytteenotto.
- Ilmoita lääkärille / näytteenottajalle miten näyte valmistellaan ja lähetetään mukana tulevien ohjeiden mukaisesti. Varmista, että näyte voidaan pitää kylmänä / pakastaa.
- Näytteenottopäivänä, ennen näytteenottoa, soita DHL: lle (katso lähetysohjeet) ennen kello 14.00 ja järjestä nouto lääkärin tai näytteenottajan luota. (Vaihtoehtoisesti voit järjestää noudon omasta osoitteestasi.)
- DHL: llä on 3 tunnin aikaikkuna noudoille. Kerro heille, että lähetys on noudettava ennen klo 17.00

Tarvitsemme seuraavat tiedot

- Henkilötietolomake: tarkista, että lomakkeella olevat tiedot ovat oikein ja muokkaa niitä tarvittaessa.

Ennen näytteenottoa

- Aseta jääpakkaus pakastimeen vähintään 8 tunniksi ennen näytteen lähetystä.
- Näytteen tulee olla jäätyneenä vähintään 2h ennen lähetystä. Pidä näyte pakasteessa kunnes olet valmis lähettämään.
- Näytteen tulee saapua laboratorioon 24 tunnin sisällä näytteenotosta.
- Seuraavat lääkkeet saattavat vaikuttaa tuloksiin:
 - glukokortikoidit (esim. Prednisoni), dopamiini, litium, alfainterferoni, fenobarbitaali, fenytoiini, hepariini, klofibratti, karbamatsepiini ja kolestipoli.
- Älä koskaan keskeytä lääkitystä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa.

Näytteenotto-ohjeet

Tärkeää: Näytteenotto-ohjeet on tarkoitettu ainoastaan ammattilaiselle kuten lääkärille tai hoitajalle.




Vaihe 1:

Kirjoita potilaan koko nimi sekä päivämäärä ja kellonaika molempiin putkiin. Merkitse näytteenottotiedot myös henkilötietolomakkeelle. **Tärkeää:** Pyydytety tiedot tulee olla täytetty huolellisesti, jotta tulokset voidaan toimittaa luotettavasti.



Vaihe 6:

Laita imupaperi valkokorkkisen näyteputken ympärille ja laita se biovaarapussiin varmistaen, että pussi on tiukasti suljettu ja jäädytä välittömästi. Näyte on pakastettava vähintään 2 tuntia ennen toimitusta. Pidä näyte jäädytettynä, kunnes se on valmis lähetettäväksi.

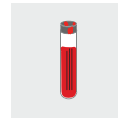


Vaihe 2:

Ota SST putki täyteen laskimoverta.



Vaihe 7:

Kun olet valmis lähettämään, varmista, että valkokorkkinen näyteputki on huolellisesti suljettu ja olet kirjoittanut tarvittavat tiedot näyteputkeen. Laita biovaarapussi kuplamuovipussiin ja lämpöeristettyyn laatikkoon jääpakkauksen päälle. Laita sitten lämpöeristetty laatikko lähetyslaatikkoon henkilötietolomakkeen kanssa.

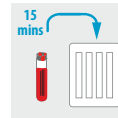


Vaihe 3:

Aseta SST-putki pystyyn telineeseen ja anna veren hyytyä 15 minuuttia.



Vaihe 4:

Sentrifugoi SST putki 15 minuutin ajan, 3000 RPM.

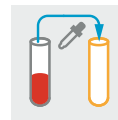

Vaihe 5:

Siirrä kaikki seerumi pipetillä valkokorkkiseen läpinäkyvään kuljetusputkeen. Sulje korkki huolellisesti. Heitä SST-putki pois.